

signia

# Motion 13 Nx, Motion 13P Nx

Upute za uporabu



Made for

iPhone | iPad | iPod

# Sadržaj

<b>Dobro došli</b>	<b>4</b>
<b>Vaša slušna pomagala</b>	<b>5</b>
Tip slušnih pomagala	5
Upoznavanje slušnih pomagala	6
Komponente i nazivi	7
Kontrolni elementi	10
Slušni programi	11
Funkcije	12
<b>Baterije</b>	<b>13</b>
Veličina baterije i savjeti za rukovanje	13
Zamjena baterija	14
<b>Svakodnevna uporaba</b>	<b>15</b>
Uključivanje i isključivanje	15
Umetanje i skidanje slušnih pomagala	17
Podešavanje jačine zvuka	20
Promjena slušnog programa	20
Dodatna podešavanja (opcionalno)	21
<b>Posebne situacije slušanja</b>	<b>22</b>
Telefoniranje	22
Audio prijenos podataka putem iPhonea	23
Zrakoplovni način	23
Zvučne induktivne petlje (opcionalno)	24

<b>Održavanje i njega</b>	<b>25</b>
Slušna pomagala	25
Umeci, kukice i cjevčice	26
Profesionalno održavanje	30
<b>Dodatne informacije</b>	<b>31</b>
Sigurnosne informacije	31
Dodatna oprema	31
Simboli korišteni u ovom dokumentu	32
Otklanjanje problema	33
Informacije specifične za određenu zemlju	34
Servis i jamstvo	35

# Dobro došli

Hvala što ste se odlučili za naša slušna pomagala. Kao i kod svih novih uređaja, bit će vam potrebno određeno vrijeme da ih upoznate.

Ove upute, uz podršku Vašeg akustičara za slušna pomagala, pomoći će Vam da shvatite prednosti i veću kvalitetu života koje nude Vaša slušna pomagala.

Kako biste imali najviše koristi od svojih slušnih pomagala, preporučljivo je da ih nosite svakodnevno cijeli dan. To će vam pomoći da se naviknete na svoja nova slušna pomagala.



## **OPREZ**

Važno je da temeljito i potpuno pročitate ove upute za uporabu i priručnik o sigurnosti. Poštujte sigurnosne informacije kako biste izbjegli oštećenja ili ozljede.

# Vaša slušna pomagala



Ove upute za uporabu opisuju opcionalne funkcije koje Vaša slušna pomagala možda imaju ili nemaju. Zamolite svog akustičara za slušna pomagala da označi funkcije koje su važeće za Vaša slušna pomagala.

## Tip slušnih pomagala

Vaša su slušna pomagala modeli BTE („behind-the-ear“) za nošenje iza uha. Cjevčica prenosi zvuk od slušnog pomagala u uho. Slušna pomagala nisu prikladna za djecu mlađu od tri godine ili za osobe s razvojnom dobi ispod tri godine.

Bežična funkcija omogućuje napredne audiološke značajke i sinkronizaciju Vaših dvaju slušnih pomagala.

Značajka Vašeg slušnog pomagala

Bluetooth® low energy\* omogućuje jednostavnu razmjenu podataka s vašim pametnim telefonom i neometan audio prijenos podataka s iPhoneom\*\*.

\* Oznaka i logo Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba takve oznake od strane proizvođača ovog proizvoda pod licencijom je. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju svojim vlasnicima.

\*\* iPad, iPhone i iPod zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama.

## Upoznavanje slušnih pomagala

Preporučuje se da dobro upoznate svoja nova slušna pomagala. Uzmite slušna pomagala u ruke, isprobajte kontrolne elemente i zapamtite njihov položaj na slušnom pomagalu. Kasnije, za vrijeme nošenja slušnih pomagala, to će Vam olakšati da osjetite i pritišćete kontrolne elemente.




Ako imate teškoća s pritiskanjem kontrolnih elemenata tijekom nošenja slušnih pomagala, možete upravljati svojim pomagalima daljinskim upravljačem. Uz namjensku aplikaciju za pametni telefon na raspolaganju Vam je još više opcija upravljanja.

## Komponente i nazivi

U ovim uputama za uporabu opisani su različiti tipovi slušnih pomagala. Pomoću slika u nastavku možete utvrditi koji tip slušnih pomagala koristite.


Vaša slušna pomagala pričvršćuju se na kukicu i individualno prilagođeni umetak ili standardnu cjevčicu (ThinTube) i standardni umetak (LifeTip).

### Motion 13 Nx

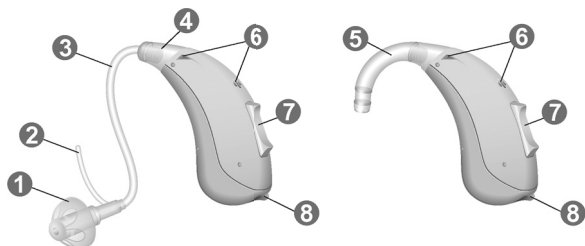

- 
- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ① Umetak (LifeTip)                 | ⑤ Kukica  |
| ② Žica za zadržavanje (opcionalno) | ⑥ Otvori mikrofona  |
| ③ Cjevčica (ThinTube)              | ⑦ Prekidač klackalica (kontrolni element)                       |
| ④ Adapter za ThinTube              | ⑧ Pretinac za bateriju (prekidač za uključivanje/isključivanje) |
-

## Motion 13P Nx

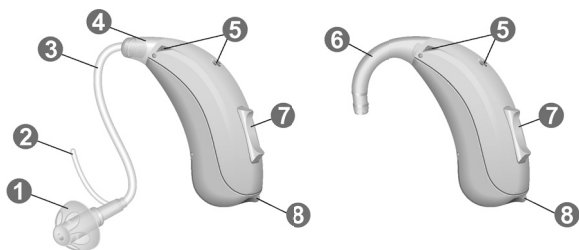

**1** Umetak (LifeTip)

**2** Žica za zadržavanje  
(opcionalno)

**3** Cjevčica (ThinTube)

**4** Adapter za ThinTube

**5** Otvori mikrofona

**6** Kukica

**7** Prekidač klackalica  
(kontrolni element)


**8** Pretinac za bateriju  
(prekidač za  
uključivanje/isključivanje)





Možete koristiti standardne umetke zajedno sa standardnom cjevčicom ili individualno prilagođene umetke zajedno s kukicom i cjevčicom.

Možete lako zamijeniti standardne umetke i očistiti standardnu cjevčicu. Pročitajte više u odjeljku „Održavanje i njega”.

Standardni umeci / cjevčice	Veličina
-----------------------------	----------

<input type="radio"/> 	LifeTip otvoreni ili zatvoreni
---	--------------------------------


<input type="radio"/> 	LifeTip poluotvoreni
---	----------------------

<input type="radio"/> 	LifeTip dvostruki
---	-------------------

<input type="radio"/> ThinTube	
--------------------------------	--


Individualno prilagođeni umeci
--------------------------------

<input type="radio"/> Primjeri:
---------------------------------

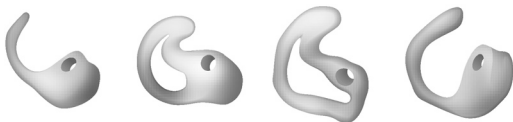

## Kontrolni elementi

Prekidačem klackalicom možete, na primjer, podešavati jačinu zvuka ili mijenjati slušne programe. Vaš akustičar za slušna pomagala programirao je prekidač klackalicu s Vašim željenim funkcijama.

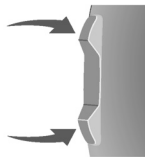

<b>Funkcija prekidača klackalice</b>	<b>L</b>	<b>R</b>
<b>Pritisnite kratko:</b>		
Sljedeći/prethodni program	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pojačanje/stišavanje zvuka	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pojačanje/stišavanje razine signala za tretiranje tinitusa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prijenos podataka na TV prijamnik uključen/isključen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Pritisnite i držite oko 2 sekunde:</b>		
Sljedeći/prethodni program	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pojačanje/stišavanje zvuka	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pojačanje/stišavanje razine signala za tretiranje tinitusa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prijenos podataka na TV prijamnik uključen/isključen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<b>Funkcija prekidača klackalice</b>	<b>L</b>	<b>R</b>
Pritisnite i držite dulje od 3 sekunde:		
Pripravnost/uključivanje	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aktivacija/deaktivacija zrakoplovnog načina	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = lijevo, R = desno



Daljinskim upravljačem također možete promijeniti slušni program ili prilagoditi jačinu zvuka na svojim slušnim pomagalima. Uz našu aplikaciju za pametni telefon na raspolaganju Vam je još više opcija upravljanja.

## Slušni programi

---

1

---

2

---

3

---

4

---

5

---

6

Pročitajte više u odjeljku „Promjena slušnog programa”.

## Funkcije

- Uključivanje s kašnjenjem** omogućuje umetanje slušnih pomagala bez pištanja.  
Pročitajte više u odjeljku „Uključivanje i isključivanje”.
- Funkcija tretiranja tinitusa** proizvodi zvuk koji Vam odvlači pozornost od tinitusa.
- Telefonska zavojnica** integrirana je u pretinac za bateriju i omogućuje spajanje slušnog pomagala sa zvučnim induktivnim petljama.  
Pročitajte više u odjeljku „Zvučne induktivne petlje”.

# Baterije

Kada je baterija slaba, zvuk slušnog pomagala postaje slabiji ili se čuje signal upozorenja. O tipu baterije ovisi kada morate zamijeniti bateriju.

## Veličina baterije i savjeti za rukovanje

Zatražite od svog akustičara za slušna pomagala da Vam preporuči prikladne baterije.

---

Veličina baterije:	13
--------------------	----

---

- Uvijek koristite ispravnu veličinu baterije za svoja slušna pomagala.
- Uklonite baterije ako ne namjeravate koristiti slušna pomagala nekoliko dana.
- Uvijek nosite rezervne baterije.
- Uklonite prazne baterije odmah i slijedite lokalna pravila o recikliranju za odlaganje baterija na otpad.


## Zamjena baterija

Vađenje baterije:

- ▶ Otvorite pretinac za bateriju.



- ▶ Koristite magnetni štapić da biste izvadili bateriju. Magnetni štapić na raspolaganju je kao dodatna oprema.

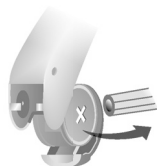

Stavljanje baterije:

- ▶ Ako baterija ima zaštitnu foliju, uklonite je samo kada ste spremni upotrijebiti bateriju.



- ▶ Stavite bateriju tako da simbol „+” bude okrenut prema gore (pogledajte sliku).



- ▶ Pažljivo zatvorite pretinac za bateriju. Ako osjetite otpor, baterija nije pravilno stavljena.

Ne pokušavajte silom zatvoriti pretinac za bateriju. Tako biste ga mogli oštetiti.

# Svakodnevna uporaba

## Uključivanje i isključivanje

Slušna pomagala se uključuju i isključuju na sljedeće načine.

Pomoću pretinca za bateriju:

- ▶ Uključivanje: zatvorite pretinac za bateriju.  
Postavljaju se **polazna** jačina zvuka i slušni program.
- ▶ Isključivanje: otvorite pretinac za bateriju do prvog graničnika.

Pomoću prekidača klackalice:

- ▶ Uključivanje ili isključivanje: pritisnite prekidač klackalicu i držite ga pritisnutim nekoliko sekunda. U odjeljku „Kontrolni elementi” pogledajte postavke prekidača klackalice.  
Nakon uključivanja, **prethodno** korištena jačina zvuka i slušni program ostaju podešeni.

Uključivanje ili isključivanje slušnog pomagala može po želji biti praćeno signalom upozorenja, koji čujete samo dok nosite slušna pomagala.

Kada je aktivirano **uključivanje s kašnjenjem**, slušna pomagala se uključuju s odgodom od nekoliko sekunda. U međuvremenu možete umetnuti slušna pomagala u uši bez neugodnog pištanja u ušima.

„Uključivanje s kašnjenjem” može aktivirati Vaš akustičar za slušna pomagala.



## Umetanje i skidanje slušnih pomagala

Slušna pomagala specijalno su prilagođena za Vaše lijevo i desno uho. Po boji oznake na slušnom pomagalu prepoznat ćete za koje je uho prilagođeno Vaše slušno pomagalo:

- crvena oznaka = desno uho
- plava oznaka = lijevo uho




Umetanje slušnog pomagala:

- ▶ Držite cjevčicu blizu umetka.
- ▶ Pažljivo gurnite umetak u slušni kanal ①.

- ▶ Malo ga okrenite tako da dobro sjedne na mjesto.

Otvorite i zatvorite usta da biste izbjegli sakupljanje zraka u slušnom kanalu.

- ▶ Podignite slušno pomagalo i prevucite ga preko ušne školjke ②.

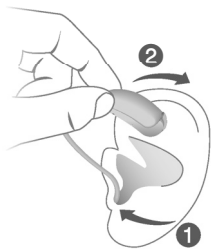

### **OPREZ**

Opasnost od ozljede!

- ▶ Umetnite umetak pažljivo i ne preduboko u uho.

**i**

- Možete si olakšati ako **desno** slušno pomagalo umetnete **desnom** rukom, a **lijevo** slušno pomagalo **lijevom** rukom.
- Ako imate problema s umetanjem umetka, drugom rukom pažljivo povucite ušnu resicu prema dolje. Na taj se način otvara slušni kanal i olakšava umetanje umetka.


Opcionalna žica za zadržavanje pomaže da se umetak sigurno zadrži u uhu. Za pozicioniranje žice za zadržavanje:

- ▶ Savijte žicu za zadržavanje i pažljivo je stavite u donji dio ušne školjke (pogledajte sliku).



Uklanjanje slušnog pomagala:

- ▶ Podignite slušno pomagalo i prevucite ga preko ušne školjke ①.
- ▶ Držite cjevčicu blizu umetka i pažljivo izvadite umetak ②.

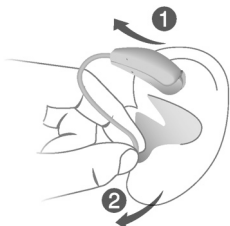

### OPREZ

Opasnost od ozljede!

- ▶ U vrlo rijetkim slučajevima, umetak može ostati u uhu prilikom skidanja slušnog pomagala. U tom slučaju obratite se liječniku specijalistu radi skidanja umetka.

Svoja slušna pomagala očistite i osušite poslije uporabe. Pročitajte više u odjeljku „Održavanje i njega”.

## **Podešavanje jačine zvuka**

Vaša slušna pomagala automatski prilagođavaju jačinu zvuka situaciji slušanja.

- ▶ Ako Vam je lakše ručno podešavanje jačine zvuka, pritisnite prekidač klackalicu.

U odjeljku „Kontrolni elementi” pogledajte kako se postavlja prekidač klackalica.

Opcionalni zvučni signal može ukazivati na promjenu jačine zvuka. Kada se dosegne maksimalna ili minimalna jačina zvuka, možda ćete također čuti opcionalni zvučni signal.

## **Promjena slušnog programa**

Ovisno o situacijama slušanja, Vaša slušna pomagala automatski podešavaju karakter zvuka.

Vaša slušna pomagala također mogu imati nekoliko slušnih programa koji omogućavaju da po potrebi sami mijenjate karakter zvuka. Opcionalni zvučni signal može ukazivati na promjenu programa.

- ▶ Da biste promijenili slušni program, pritisnite prekidač klackalicu.

U odjeljku „Kontrolni elementi” pogledajte kako se postavlja prekidač klackalica. U odjeljku „Slušni programi” nalazi se popis Vaših slušnih programa.

Primjenjena je zadana glasnoća.

## **Dodatna podešavanja (opcionally)**

Kontrolnim elementima slušnih pomagala možete promijeniti i druge značajke, na primjer, razinu signala za tretiranje tinitusa.

U odjeljku „Kontrolni elementi” pogledajte postavke Vaših kontrolnih elemenata.

# Posebne situacije slušanja

## Telefoniranje

Kada telefonirate, telefonsku slušalicu podignite malo iznad uha. Slušno pomagalo i telefonska slušalica moraju biti poravnani. Telefonsku slušalicu malo zakrenite tako da uho ne bude potpuno pokriveno.



## Telefonski program

Kada koristite telefon, odgovarat će Vam određena jačina zvuka. Zatražite od svog akustičara za slušna pomagala da konfigurira telefonski program.

- ▶ Prebacite se na telefonski program kad god razgovarate preko telefona.

Ako je telefonski program konfiguriran za Vaša slušna pomagala, naveden je u odjeljku „Slušni programi”.

## **Audio prijenos podataka putem iPhonea**

Vaša slušna pomagala imaju oznaku **Made for iPhone**. To znači da možete primati telefonske pozive ili slušati glazbu s iPhonea izravno u Vaša slušna pomagala.

Za više informacija o uređajima kompatibilnima sa sustavom iOS, uparivanju, audio prijenosu podataka i drugim korisnim funkcijama obratite se svom akustičaru za slušna pomagala.

## **Zrakoplovni način**

U područjima gdje korištenje Bluetooth tehnologije nije dopušteno (npr. u nekim zrakoplovima) možete aktivirati zrakoplovni način. Time se privremeno isključuje Bluetooth u Vašim slušnim pomagalima. Slušna pomagala i dalje rade bez Bluetooth tehnologije, no izravan audio prijenos podataka nije moguć i neke druge funkcije nisu dostupne.

- ▶ Aktivirajte ili deaktivirajte zrakoplovni način aplikacijom na pametnom telefonu ili kontrolnim elementima na slušnom pomagalu.

U odjeljku „Kontrolni elementi” potražite dodatne informacije.

Čuje se zvuk upozorenja prilikom aktivacije ili deaktivacije zrakoplovnog načina.

## Zvučne induktivne petlje (opcionally)

Neki telefoni i javne ustanove, kao što su kazališta, pružaju zvučni signal (glazba i govor) putem zvučne induktivne petlje. Pomoću ovog sustava, Vaša slušna pomagala mogu izravno primati željeni signal – bez ometajućeg šuma iz okruženja.

Sustave zvučne induktivne petlje obično možete prepoznati po određenim znakovima.



Ako želite koristiti taj sustav, potreban je poseban pretinac za bateriju. Dostupan je kao dodatna oprema samo za određene tipove slušnih pomagala. Za dodatne informacije obratite se svom akustičaru za slušna pomagala.

Uvijek kada se nalazite u blizini zvučne induktivne petlje:

- ▶ Prebacite na program telefonske zavojnice.

Ako je program telefonske zavojnice konfiguriran za Vaša slušna pomagala, naveden je u odjeljku „Slušni programi”.

### Program telefonske zavojnice i daljinski upravljač



#### **NAPOMENA**

Pomagala koja se povezuju bežičnim putem:  
Kada je program telefonske zavojnice aktivan, daljinski upravljač može uzrokovati pulsirajući zvuk.

- ▶ Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od najmanje 10 cm.



# Održavanje i njega

Kako biste spriječili oštećenja, važno je da brinete o svojim slušnim pomagalima i slijedite nekoliko osnovnih pravila koja će uskoro sasvim sigurno postati dio Vaše svakodnevne rutine.

## Slušna pomagala

### Sušenje i čuvanje

- ▶ Slušna pomagala sušite preko noći.
- ▶ Za duža razdoblja nekorištenja svoja slušna pomagala čuvajte u suhim uvjetima s otvorenim pretincem za bateriju s uklonjenim baterijama.
- ▶ Dodatne informacije zatražite od svojega akustičara za slušna pomagala.

### Čišćenje

Vaša slušna pomagala imaju zaštitni sloj. Unatoč tomu, morate redovito čistiti svoja slušna pomagala kako biste izbjegli oštećenje slušnih pomagala ili zdravstvene rizike.

- ▶ Slušna pomagala čistite svakodnevno mekom, suhom tkaninom.
- ▶ Nikada nemojte koristiti tekuću vodu ili uranjati uređaje u vodu.
- ▶ Nikada nemojte primijeniti silu tijekom čišćenja.
- ▶ Zamolite svog akustičara za slušna pomagala da Vam preporuči proizvode za čišćenje, dodatnu opremu za njegu ili da Vam pruži dodatne informacije o načinu održavanja slušnih pomagala u dobrom stanju.



## Umeci, kukice i cjevčice

Cerumen (ušna mast) može se akumulirati na umecima. To može negativno utjecati na kvalitetu zvuka.

- Za slušna pomagala sa standardnom cjevčicom (ThinTube):

Umetke čistite svaki dan, a cjevčice čistite po potrebi.

Zamijenite umetke i cjevčice otprilike svakih tri do šest mjeseci ili ranije ako primijetite pukotine ili druge promjene.

- Za slušna pomagala s kukicom:

Umetke čistite svaki dan.


Zamijenite kukice ako primijetite pukotine ili druge promjene.

Zamolite svog akustičara za slušna pomagala da Vam po potrebi očisti cjevčice ili zamijeni umetke i cjevčice.

### Čišćenje umetaka

- ▶ Očistite umetke nakon vađenja mekom i suhom tkaninom.

Tako sprječavate da se cerumen osuši i stvrdne.

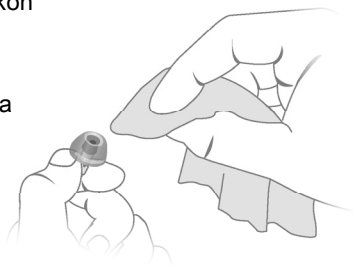


- ▶ Nikada nemojte koristiti tekuću vodu ili uranjati umetke u vodu.

## Čišćenje standardnih cjevčica

Nikada nemojte upotrebljavati tekuću vodu ili uranjati cjevčice u vodu.

Možete čistiti standardne cjevčice (ThinTube) pomoću specijalne žice za čišćenje. Odgovarajuće žice za čišćenje zatražite od svog akustičara za slušna pomagala.


- ▶ Odspojite cjevčicu i adapter sa slušnog pomagala odvrtanjem adaptera.
- ▶ Pažljivo umetnite žicu za čišćenje u adapter **1**.
- ▶ Gurnite žicu za čišćenje do kraja kroz cjevčicu **2**.

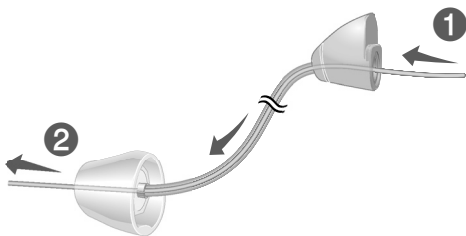

- ▶ Obrišite istisnuti cerumen ili ostatke nečistoće.
- ▶ U potpunosti izvadite žicu za čišćenje.
- ▶ Ponovno pričvrstite cjevčicu i adapter na slušno pomagalo.


### Zamjena standardnih umetaka (LifeTip)

- ▶ Skinite korišteni umetak i pričvrstite novi umetak.

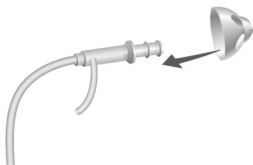

### Zamjena standardnih cjevčica i adaptera

- ▶ Odvrnite korištenu cjevčicu da biste je odvojili od adaptera ①.
- ▶ Po potrebi odvrnite korišteni adapter ②.

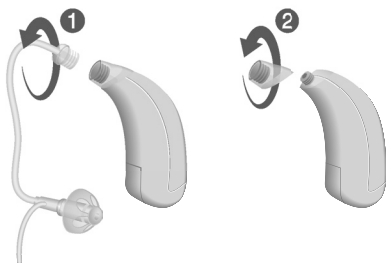


- ▶ Navrnite novi adapter i novu cjevčicu.

## Zamjena kukica

- ▶ Odvrnite korištenu kukicu.
- ▶ Postavite kukicu na navoj kao što je prikazano na slici ①.
- ▶ Lagano zavrnite kukicu s tri puna okreta ②.

Nemojte je dodatno okretati kako biste izbjegli oštećenje.

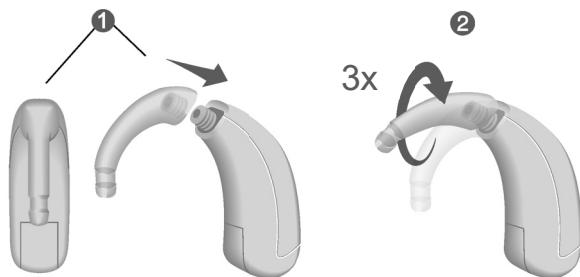

## Profesionalno održavanje

Vaš akustičar za slušna pomagala može izvršiti temeljito profesionalno čišćenje i održavanje.

Zamjenu umetaka izrađenih po mjeri i filtera za ušnu mast po potrebi treba obaviti Vaš akustičar za slušna pomagala.

Obratite se svom akustičaru za slušna pomagala radi pojedinačnih preporuka za intervale održavanja i radi podrške.

# **Dodatne informacije**

## **Sigurnosne informacije**

Dodatne sigurnosne informacije naći ćete u priručniku o sigurnosti koji je isporučen s uređajem.

## **Dodatna oprema**

Možete upotrebljavati aplikaciju smartphone app za praktično daljinsko upravljanje slušnim pomagalicama. Tom aplikacijom također možete isključiti zvučne signale, izraditi individualne zvučne profile i prilagoditi mnoge druge funkcije.

Također možete koristiti daljinski upravljač.

Za dodatne informacije obratite se svom akustičaru za slušna pomagala.

## Simboli korišteni u ovom dokumentu

---



Ukazuje na situaciju koja bi mogla dovesti do teških, umjerenih ili lakših ozljeda.

---



Ukazuje na moguće oštećenje imovine.

---



Savjeti i prijedlozi za učinkovitiju uporabu uređaja.

---

Made for



iPhone | iPad | iPod

Oznake „Made for iPhone”, „Made for iPad” i „Made for iPod” ukazuju na to da je elektronički pribor posebno osmišljen za povezivanje s iPhoneom, iPadom ili iPodom te da je njegov razvojni programer potvrdio da odgovara standardima tvrtke Apple. Tvrтка Apple ne snosi odgovornost za rad ovog uređaja, ni za njegovu sukladnost sa sigurnosnim i zakonskim normama. Imajte na umu da uporaba ovog pribora s iPhoneom, iPadom ili iPodom može utjecati na učinkovitost bežične veze.



## Otklanjanje problema

### Problem i moguća rješenja

---

Zvuk je slab.

---

- Pojačajte zvuk.
  - Zamijenite praznu bateriju.
  - Očistite ili zamijenite cjevčicu i umetak.
- 

Iz slušnog pomagala čuje se pištanje.

---

- Ponovo postavite umetak tako da sigurno nalegne.
  - Stišajte zvuk.
  - Očistite umetak ili ga zamijenite.
- 

Zvuk je izobličen.

---

- Stišajte zvuk.
  - Zamijenite praznu bateriju.
  - Očistite ili zamijenite cjevčicu i umetak.
- 

Iz slušnog pomagala čuju se zvučni signali.

---

- Zamijenite praznu bateriju.
- 

Slušno pomagalo ne radi.

---

- Uključite slušno pomagalo.
  - Pažljivo zatvorite pretinac za bateriju do kraja.
  - Zamijenite praznu bateriju.
  - Provjerite je li baterija pravilno postavljena.
  - Uključivanje s kašnjenjem je aktivno. Pričekajte nekoliko sekunda i provjerite ponovno.
- 

U slučaju daljnjih problema obratite se svom akustičaru za slušna pomagala.

## **Informacije specifične za određenu zemlju**

### **SAD i Kanada**

Podaci o certifikatima za slušna pomagala s bežičnom funkcijom:

#### **Motion 13 Nx**

- FCC ID: SGI-BTE001
- IC: 267AB-BTE001

#### **Motion 13P Nx**

- Sadrži FCC ID: SGI-RFM001
- IC: 267AB-WP4N1

## Servis i jamstvo

### Serijski brojevi

Lijevo:

Desno:

### Datumi servisiranja

1: 4:

2: 5:

3: 6:

### Jamstvo

Datum kupnje:

Jamstveno razdoblje u mjesecima:

### Vaš akustičar za slušna pomagala



**Proizvođač**

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Njemačka

Telefon +49 9131 308 0

Document No. 03340-99T03-W500 HR

Order/Item No. 109 506 64

Master Rev03, 07.2019

© 09.2019, Signia GmbH. All rights reserved



**[www.signia-hearing.com](http://www.signia-hearing.com)**